

# 多酵素洗剤 ピュアステージ™ CZ

医療用



ピュアステージ™ CZ (5Lボトル)

三種類の酵素を配合した液状酵素洗剤です。医療器械、内視鏡、デンタル用器械に付着した血液、粘液、脂肪を効果的に分解します。

## 製品概要

ピュアステージ™ CZは浸漬用酵素洗剤です。20°Cの冷水で希釈しても良好な洗浄力が得られるため、恒温槽をお持ちでない材料部でも、本製品を効果的にご使用頂くことが出来ます。また配合された三種類の酵素が手術器械や内視鏡、デンタル器械に付着した血液や粘液、脂肪などのガンコな汚れを効果的に分解します。本製品はpH中性のため、デリケートな材質の手術器械も、材質を痛めることなく洗浄することが出来ます。

## 推奨ユーザー

ピュアステージ™ CZは下記のようなユーザー様に推奨します。

- 材料部に恒温槽がないため、希釈した酵素洗剤を加熱できない。そんな環境でも洗浄力がある酵素洗剤を選びたい。
- 手術器械に付着した血液汚染だけでなく、粘液や脂肪汚染にも効果のある酵素洗剤を使いたい。
- 硬性内視鏡などのデリケートな光学系機器も安心して洗える酵素洗剤が欲しい。

## 製品の特長

- 血液たんぱく質だけでなく、粘液や脂肪などの汚れも分解し、洗い流します。
- 極めて優れた洗浄力
- 冷水で希釈しても、良好な洗浄効果
- 優れた材質適合性
- 僅かな希釈率で優れた洗浄力

## 希 釈 率

希 釈 率	浸 漬 時 間
1%希釈 (1リットルあたり10ml)	10～20分 (汚れの程度により、浸漬時間は調節してください)

- 器械の汚れ具合に応じて、希釈率を0.3～2%（水1Lにつき3～20mL）の間で調節して、御使用ください。汚れが乾燥固化している場合は、浸漬時間を延長するか、希釈率を2%（1リットルあたり20mL）に上げて運用してみてください。
- 超音波洗浄機などを使用するときは、機器の製造元が推奨する方法で行ってください。

### 浸漬温度

浸漬温度	20～45℃
------	--------

- 浸漬温度を上げると酵素活性が高まり、洗浄効果が上昇します。
- 45℃で浸漬する場合、血液汚染中の蛋白質が熱凝固を起こし、分解しにくくなります。その為、浸漬前に、冷水で器材表面の血液を軽く洗い流してから浸漬すると、効果的です。

### 使用上のポイント

- 管状器械を浸漬する際は、内腔に気泡が残らないよう、気をつけること。
- 汚染物が乾燥固化した場合は、浸漬時間を延長したり、ブラッシングをしてください。
- 洗浄後は清潔な水で十分にすすぐこと。

### 化学/物理的データ

液性	中性
外観	緑茶色
主成分	界面活性剤、蛋白質分解酵素、澱粉分解酵素、脂肪分解酵素、錆抑制剤、保存剤

### 入り数（容量）と商品コード

内容量	5リッター/本
入り数	3本/箱
商品コード	CP0103

製造販売元：



キャスロックメディカル株式会社

大阪府大東市氷野1-14-38

TEL:072-870-7071 <https://www.casrock-medical.co.jp/>