

多酵素洗浄剤 ピュアステージュ™ CZ

医療用



ピュアステージュ™ CZ (5Lボトル)

Purestige CZ

三種類の酵素を配合した液状酵素洗浄剤です。医療器械、内視鏡、デンタル用器械に付着した血液、粘液、脂肪を効果的に分解します。

製品概要

ピュアステージュ™ CZは浸漬用酵素洗浄剤です。20°Cの冷水で希釈しても良好な洗浄力が得られるため、恒温槽をお持ちでない材料部でも、本製品を効果的にご使用頂くことが出来ます。また配合された三種類の酵素が手術器械や内視鏡、デンタル器械に付着した血液や粘液、脂肪などのガンコな汚れを効果的に分解します。本製品はpH中性のため、デリケートな材質の手術器械も材質を痛めることなく洗浄することが出来ます。

推奨ユーザー

ピュアステージュ™ CZは下記のようなユーザー様に推奨します。

- 材料部に恒温槽がないため、希釈した酵素洗浄剤を加熱できない。そんな環境でも洗浄力がある酵素洗浄剤を選びたい。
- 手術器械に付着した血液汚染だけでなく、粘液や脂肪汚染にも効果のある酵素洗浄剤を使いたい。

製品の特長

- 血液たんぱく質だけでなく、粘液や脂肪などの汚れも分解し、洗い流します。
- 極めて優れた洗浄力
- 冷水で希釈しても、良好な洗浄効果
- 優れた材質適合性
- 僅かな希釈率で優れた洗浄力

希 釈 率

希 釈 率	浸 漬 時 間
-------	---------

1%希釈（1リットルあたり10m l）	10～20分（汚れの程度により、浸漬時間は調節してください）
---------------------	--------------------------------

- 器械の汚れ具合に応じて、希釈率を0.3～2%（水1Lにつき3～20mL）の間で調節して、御使用ください。汚れが乾燥固化している場合は、浸漬時間を延長するか、希釈率を2%（1リットルあたり20m l）に上げて運用してみてください。
- 超音波洗浄機等で使用する時は、機器の製造元が推奨する方法で行ってください。

浸漬温度

浸漬温度	20～45℃
------	--------

- 浸漬温度を上げると酵素活性が高まり、洗浄効果が上昇します。
- 45℃で浸漬する場合、血液汚染中の蛋白質が熱凝固を起こし、分解しにくくなります。その為、浸漬前に、冷水で器材表面の血液を軽く洗い流してから浸漬すると、効果的です。

使用上のポイント

- 管状器械を浸漬する際は、内腔に気泡が残らないよう、気をつけること。
- 汚染物が乾燥固化した場合は、浸漬時間を延長したり、ブラッシングをしてください。
- 洗浄後は清潔な水で十分にすすぐこと。

化学/物理的データ

液性	中性
外観	緑茶色
主成分	界面活性剤、蛋白質分解酵素、澱粉分解酵素、脂肪分解酵素、錆抑制剤、保存剤

入り数（容量）と商品コード

内容量	5リッター/本
入り数	3本/箱
商品コード	CP0103



製造販売元：

キャスロックメディカル株式会社

大阪府大東市氷野1-14-38

TEL:072-870-7071 <https://www.casrock-medical.co.jp/>