

# 酵素濃縮液 ピュアステージジュ™ JB

医療用



ピュアステージジュ™ JB (4Lボトル)

## Purestige™ JB

ウオッシャーディスインフェクター専用の中性添加剤です。

僅かな量の本製品を添加するだけで、洗浄工程の効率が高まり、洗浄プログラムの短時間化に貢献します。

### 製品概要

ピュアステージジュ™ JB はWD専用の中性添加剤です。WDの洗浄工程が始まってから、槽内に僅かな量の本製品を添加するだけで、中温域の洗浄力が格段に高まり、洗浄プログラムの短時間化に貢献します。配合された二種類の酵素が、手術器械やデンタル用器械にガンコに付着した血液たんぱく質や粘液を、効果的に分解します。

### 推奨ユーザー

ピュアステージジュ™ JBはこうしたユーザー様に推奨します。

- 一次洗浄を廃止し、WDによる自動洗浄のみとしたいが、清浄度のレベルは落としたい。
- 洗浄プログラムを短時間化し、手持ちのWDの回転を良くしたい。

### 製品の特長

- 二種類の酵素がたんぱく質や粘液などのガンコな汚れを効果的に分解します。
- 配合した界面活性剤がWDのジェット洗浄の力を高めます。
- 濃縮タイプのため、僅かな量を注入するだけで優れた洗浄力が得られます。
- 原液はpH中性のため、配合した酵素は安定して原液中で保存されます。
- pH中性のため、手術器械の材質への適合性に優れます。

### 使用上のポイント

- 本製品は濃縮液であり、使用するWDに薬液ポンプや液面警報装置等のパーツが必要です。
- 本製品を用いるには、お手持ちのWDに洗浄工程で二基の薬液ポンプを順次駆動させる機能が 필요합니다。詳しくは弊社にお問い合わせください。

- 本製品で洗浄する医療器械の添付文書を参照すること。

## 推奨プログラム

工程名	水質	工程時間	工程温度	薬液注入	希釈率
予洗	冷水	3m in	20℃	なし	
本洗浄	温水+冷水	10m in	60℃	メディクリン・フォルテ <sup>※</sup> とJBを槽内に順次注入する。	メディクリン・フォルテ:4~5 mL/L、JB:2mL/L
リンス①	温水	2m in	50~60℃	なし	
リンス②	温水+冷水	2m in	50~60℃	なし	
熱水消毒	純水	5m in	90℃	潤滑剤ないしは乾燥促進剤	添付文書に従う。
乾燥		10~20m in	120℃	なし	
冷却		5m in	室温	なし	

※) メディクリン・フォルテはDr. Weigert社(独)の登録商標です。

- 本製品の推奨プログラムは上の表に示す通りです。
- 本製品の注入温度は35℃以上であることを推奨します。
- 本洗浄の温度は55~60℃に設定することを推奨します。
- 本製品の希釈率は1~2 mL/L (0.1~0.2%希釈) を推奨します。本洗浄の時間は、希釈率が同じであれば、長ければ長い程、洗浄効果は高まります。

## 材質適合性

本製品はコーティングされた手術器械やラバー、プラスチックなど幅広い材質に適合し、本製品の推奨サイクルや希釈率に従った場合、金属の表面を痛めません。しかしメディクリンフォルテと組み合わせて用いる場合、材質適合性はメディクリンフォルテのそれに準じます。

## 化学/物理的データ

主成分	蛋白質分解酵素、澱粉分解酵素、界面活性剤、安定化剤、錆抑制剤、保存剤、色素
液性	中性
用途	ウォッシャーディスプレイクター、超音波洗浄器
対象	手術器械、デンタル器械

## 一般的情報

本製品は消毒剤ではない。本製品をWDで用いる場合、必ず熱水消毒工程を実施すること。

## 容量と入り数

4リッターボトル×3本入り

製造販売元:



キャスロックメディカル株式会社

大阪府大東市氷野1-14-38

TEL:072-870-7071 <https://www.casrock-medical.co.jp/>